

GUIDE DE TELECHARGEMENT

À l'aide du téléverseur
CareLink^{MC} Personal

Votre première étape vers
une meilleure compréhension
de votre diabète

POUR QUE LE TOUT SOIT EFFICACE, PRÉPAREZ VOTRE
POMPE, VOTRE LECTEUR ET VOTRE ORDINATEUR.

Connectez-vous à CareLink Personal
Branchez votre lecteur sur votre ordinateur

- Le lecteur CareLink doit être branché et placé le plus près possible de la pompe
- Gardez le lecteur connecté à la pompe



Assurez-vous que votre pompe est prête pour le telechargement


Vérifiez que la pompe n'affiche pas l'un de ces écrans :



- Aucun débit basal temporaire
- Aucune alarme
- Aucun bolus actif
- Aucune pile faible

Medtronic

QUATRE ÉTAPES FACILES POUR AJOUTER UNE NOUVELLE POMPE OU UN NOUVEAU LECTEUR

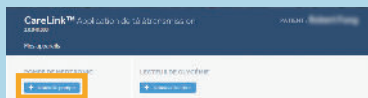

1 Choisissez Pompe ou Lecteur

Pompe




2 Sélectionnez le modèle de la pompe

Lecteur



2 Sélectionnez la marque du lecteur si vous voulez téléverser les données du lecteur de glycémie seulement

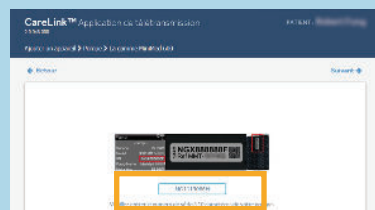

3 Entrez le numéro de série de la pompe



3 Sélectionnez le modèle du lecteur*




4 Assurez-vous que la pompe est prête
Cliquez sur « Ajouter la pompe »



4 Assurez-vous que le lecteur est prêt
Cliquez sur « Ajouter le lecteur »

DEUX ÉTAPES FACILES POUR TÉLÉVERSER LES DONNÉES D'UNE POMPE OU D'UN LECTEUR

ÉTAPE 1

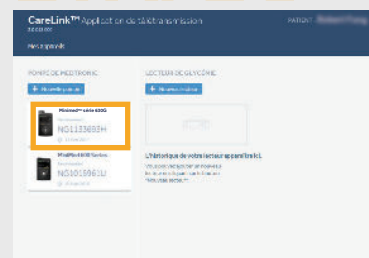

Sélectionnez l'appareil

ÉTAPE 2



- Assurez-vous que l'appareil est prêt pour le téléversement
- Cliquez sur « Téléverser maintenant »



Reliez vos données au système CareLink de votre équipe de soins de santé pour un partage de données plus efficace.

GUIDE DE TELECHARGEMENT

À l'aide du téléverseur CareLink^{MC} Personal

Information de sécurité : logiciel CareLink^{MC}

Le logiciel CareLink est destiné à être utilisé comme outil complémentaire dans la prise en charge de votre diabète, et NON comme source unique à laquelle vous fier. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le guide de l'utilisateur au www.carelink.minimed.eu*

* Les produits figurant sur ce site Web pourraient ne pas avoir été approuvés dans votre pays. Veuillez communiquer avec votre société affiliée locale pour de plus amples renseignements.

© Medtronic, 2018. Tous droits réservés. Medtronic, le logo de Medtronic et la devise « Plus loin, ensemble » sont des marques de commerce de Medtronic. Les marques de tiers sont des marques de commerce de leurs propriétaires respectifs.

Medtronic

Medtronic Canada
99, rue Hereford
Brampton (Ontario)
L6Y 0R3

Tél. : 1 800 284-4416

medtronicdiabete.ca